

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/joydivision-soft-tampons-normal-professional-box-of-50-p-100363.html>



JoyDivision Soft-Tampons normal professional box of 50

Cena	172,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	5201209
Kod producenta	185_5201209
Kod EAN	4028403122101
Producent	JoyDivision (GE)

Opis produktu

Przed wprowadzaniem i wyjmowaniem Original Soft-Tampons należy koniecznie umyć ręce! Wprowadzanie tamponu:

1. Wyjąć tampon z higienicznego opakowania.
2. W celu ułatwienia wprowadzenia nałożyć na (suchy) tampon odrobinę żelu nawilżającego (zalecamy Original AQUAglide) lub zwilżyć czystą wodą – dobrze wycisnąć w celu zapewnienia maksymalnego wchłaniania wilgoci.
3. Tampon najlepiej zakładać np. w pozycji kucznej lub siedząc na sedesie.
4. Chwycić tampon po bokach kciukiem i palcem środkowym i ścisnąć. Tampon ma kształt serca, przez co jego czubek jest węższy; ściśnięcie skrzydełek powo- duje utworzenie na spodzie wgłębienia na palec, które ułatwia wprowadzenie tamponu. Drugą ręką rozchylić wargi sromowe i wprowadzić tampon palcem wskazującym i/lub środkowym do pochwy aż do szyjki macicy.

Częstotliwość wymiany tamponu:

Zalecamy wymianę tamponu co 4 do 6 godzin. Maksymalny czas pozostawienia tamponu w pochwie wynosi 8 godzin. Po stosunku płciowym bez prezerwatywy należy natychmiast wymienić Original Soft-Tampons.

Usuwanie tamponu:

Soft-Tampons można łatwo usunąć dzięki specjalnym uchwytom w kształcie kłapek, dzięki czemu można go wyciągnąć palcem wskazującym lub środkowym za kłapki. Jeśli mimo to usuwanie tamponu okaże się trudne, zalecamy przybranie pozycji kucznej, gdyż w ten sposób zmniejsza się długość pochwy.

Zasada główna:

Jeśli nie uda się usunąć tamponu, niezbędna jest wizyta u ginekologa. Nie zapomnij usunąć ostatniego Original Soft-Tampons pod koniec menstruacji! Soft-Tampons nie są antykoncepcyjne!

UWAGA – KAŻDY TAMPON MOŻE BYĆ UŻYTY TYLKO JEDEN RAZ!

Wielokrotne używanie może prowadzić do infekcji! Przechowywać tampony Soft-Tampons w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chronionym przed dostępem światła. Odbarwienia nie stanowią wady. Tampony Soft-Tampons wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi, pozostałości opakowania zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, które obowiązują w danym kraju.

Ważne informacje dotyczące zdrowia

Zespół wstrząsu toksycznego (TSS) to bardzo rzadka, lecz poważna choroba, która może wystąpić u wszystkich ludzi. Około połowa zachorowań występuje u miesiączkujących kobiet i jest związana z używaniem tamponów. Może wystąpić również wtedy, kiedy tampony nie były używane! Zespół TSS może stanowić zagrożenie dla życia i dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie i leczenie. Jeżeli podczas miesiączki nagle wystąpi wysoka gorączka (39°C i więcej), wysypka skórna, wymioty, biegunka, bóle gardła, zawroty głowy i omdlenia, natychmiast wyjmij tampon i zgłoś się do lekarza. Powyższe objawy mogą świadczyć o TSS. Poinformuj lekarza, że jesteś w trakcie miesiączki. Osoby, które chorowały już na TSS, powinny skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem tamponów Soft-Tampons.