

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/kulki-gejszy-svakom-nova-balls-fiolet-p-105075.html>



# Kulki gejszy Svakom Nova Balls fiolet

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Cena                    | 148,00 zł     |
| Dostępność              | Niedostępny   |
| Czas dostawy do Klienta | 3 dni         |
| Numer katalogowy        | 6959633100790 |
| Kod producenta          | 6959633100790 |
| Kod EAN                 | 6959633100790 |
| Producent               | Brak          |

## Opis produktu

### Kulki Nova to profesjonalnie zaprojektowany zestaw trzech różnych kulek gejszy do ćwiczeń i zabawy!

- Każda kulka wyposażona jest w silikonowy sznureczek, którym łatwiej wyjąć kulkę po użyciu
- Kulki pokryte są silikonem i są w 100% wodoodporne.
- Kulki oferują zarówno test progresywny siły mięśni dna miednicy (zastosuj od najlżejszej do najcięższej i sprawdź kiedy kulka zaczyna wypadać), jak i prawdziwy, bezpieczny trening biofeedbackowy przy pomocy najlżejszej pojedynczej kulki.
- Wszystkie kulki mają w sobie ciężkie ruchome kuleczki, które zapewniają zmianę ciężkości i ciekawsze doznania podczas stosowania.

### Stosowanie kulek gejszy Svakom Nova Ball do treningu mięśni dna miednicy

- Użyj najlżejszej pojedynczej kulki do treningu biofeedbackowego mięśni
- Nie zaciskaj mięśni podczas treningu - mięśnie mają się kurczyć i rozkurczać samoistnie pod wpływem ruchu kulek
- Ćwicz podczas ruchu, spaceru, biegania, tańca - kulki w ruchu stymulują mięśnie dna miednicy do obkurczania się.
- Jeśli będziesz mieć kłopot z aplikacją kulek użyj odpowiedniego żelu intymnego na bazie wody. Żeby aplikacja była wygodniejsza warto przyjąć komfortową pozycję.
- Stosuj kulki w ruchu, a po treningu umyj je dokładnie.

### OSTRZEŻENIA

- Nie obciążaj mięśni dodatkowymi ciężkimi kulkami - to może pogłębiać problem nietrzymania moczu
- Kulki Svakom należy stosować wyłącznie do WYSIŁKOWEGO nietrzymania moczu
- Kobiety z tyłozgięciem macicy nie powinny trenować kulkami podwójnymi.
- Jeśli czujesz dyskomfort - wyjmij kulki niezwłocznie. Jeśli dyskomfort nie znika, skonsultuj się z lekarzem.
- Svakom odradza stosowanie swoich kulek w ciąży oraz w czasie miesiączki.
- W przypadku stosowania kulek podczas chorób kanału rozrodczego należy konsultować się z lekarzem.

### Wymiary:

- Pojedyncza kulka - średnica 36mm, długość 135mm, waga 49g
- Podwójna kulka większa - średnica 32mm, długość 170mm, waga 75g
- Podwójna kulka mniejsza - średnica 28, długość 162mm, waga 95g

### HIGIENA

Myj ciepłą wodą z mydłem po każdym użyciu i przed - dokładnie płucz z mydła. Jeśli masz skłonność do infekcji, stosuj mydło antybakteryjne i antygrzybiczne lub skorzystaj z odpowiedniego Cleanera do czyszczenia gadżetów erotycznych.

---

Kulki są w 100% wodoodporne i pokryte silikonem.